

完全セパレートタイプ実現。

アームイン式、セパレートタイプにより
左右の測定を可能に。
いつでも、どこでも、場所を選ばない
シリーズ最軽量の医用電子血圧計です。



写真はFT-205(プリンター標準装備)です。



医用電子血圧計 管理医療機器 特定保守管理医療機器

FT-205/205N

プリンター標準装備

プリンター機能なし

シンプルな操作、見やすい表示はそのままに。
従来のFTシリーズを超えた新しい血圧計のカタチです。

FT-205/205N



簡単操作

測定は腕を入れて、測定ボタンを押すだけ。どなたでもすぐに使うことができます。

セパレートタイプ

完全セパレートタイプだから左右の測定が可能に。

軽量、コンパクト

FT-205/205Nは軽量かつコンパクト。設置や収納に場所をとりません。

自動再加圧機能搭載

カフ圧が低すぎた場合、自動的に再加圧をし、加圧不足による測定ミスを防ぎます。

いつでも、どこでも、簡単血圧チェック

- 病院、医院の待合室
- スポーツクラブ
- 検診センター
- 学校保健室
- 薬局の店頭
- ホテル、旅館など
- 会社、銀行
- サウナ、ゴルフ場
- 公共施設

プリント例

通常測定データを印字することができます。

■通常測定データ



FT-205(プリンター標準装備)のみです。

設置例

※単位は(mm)です。



■オプション

- ・専用架台
- ・イス
- ・測定説明パネル

FT-205/205N仕様

| | |
|----------|--|
| 一般的名称 | 医用電子血圧計 |
| 販売名 | 医用電子血圧計 FT-205/205N |
| 血圧測定方式 | オシロメトリック方式 |
| 測定範囲 | 血圧：20～270mmHg |
| 適用腕周範囲 | 19cm～39cm |
| 圧力検出方式 | 半導体圧力センサー |
| 圧力表示誤差 | ±3mmHg |
| 最小表示値 | 1mmHg |
| 最小処理数 | 30脈拍 / 毎分 |
| 最大処理数 | 180脈拍 / 毎分 |
| 脈拍数表示の誤差 | ±5%以内 |
| 表示方式 | 7セグメントLED表示器 |
| 排気調整 | 自動排気調整 |
| 圧力リミッター | 285mmHgにて瞬間排気 |
| 記録方式 | サーマルラインプリンター ※FT-205のみ標準装備 |
| 使用環境温湿度 | 10～40℃ 85%以下 |
| 保存環境温湿度 | -5～50℃ 85%以下 |
| 電源 | 専用ACアダプター100V |
| 電源入力 | 32VA以下 |
| 重量 | 測定部：約 2.6kg 表示部：約 1.1kg |
| 最大寸法 | 測定部：190(w)×350(D)×240(H)mm 表示部：125(w)×307(D)×150(H)mm |
| 認証番号 | 第 222AGBZX00252000号 |

※本装置は JIS T 1115 : 2005に適合しています。
本仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。



メハーゲングループ

製造販売元

株式会社 パラマ・テック
<http://www.parama-tech.com/>



ISO 13485
認証取得

本社(工場)

〒813-0034 福岡市東区多の津1丁目7番5号
TEL(092)623-0813 FAX(092)623-0814

販売元

株式会社 エムアイディ
福岡市博多区美野島3丁目17番27-1号
TEL(092)436-2555 FAX(092)436-2556

関東営業所 TEL(047)383-5525
東京営業所 TEL(03)5625-3566
名古屋営業所 TEL(052)735-7571
京都営業所 TEL(075)502-5231
阪神営業所 TEL(06)6427-1337
大阪営業所 TEL(06)6339-2371
神戸営業所 TEL(078)306-0611
姫路営業所 TEL(079)284-9548
和歌山営業所 TEL(073)441-5771
岡山営業所 TEL(086)805-8744
沖縄営業所 TEL(098)859-2549

株式会社 フィデスワン
福岡市博多区美野島3丁目17番27-1号
TEL(092)436-3022 FAX(092)436-3023

福岡営業所 TEL(092)436-3022
北九州営業所 TEL(093)964-1522
久留米営業所 TEL(0942)45-8870
佐賀営業所 TEL(0952)36-9614
大分営業所 TEL(097)573-9030
長崎営業所 TEL(095)847-7184
熊本営業所 TEL(096)312-5660
宮崎営業所 TEL(0985)63-3312
鹿児島営業所 TEL(099)230-0990
佐世保出張所 TEL(0956)42-1031