



「血行測定機能付全自動血圧計」

FT-206

管理医療機器 特定保守管理医療機器



アームイン式、
セパレートタイプにより
いつでも、どこでも、
場所を選ばない
医用電子血圧計です。

完全セパレートタイプ実現。

簡単操作
軽量コンパクト
自動再加圧機能搭載



リバロッチ・コロトコフ法による測定方式を採用したセパレート型アームイン式血圧計です。

- 簡単操作** 測定は腕を入れて、測定ボタンを押すだけ。どなたでもすぐに使うことができます。
- 軽量、コンパクト** FT-206は軽量かつコンパクト。設置や収納に場所をとりません。
- セパレートタイプ** 対面測定など自由なレイアウトが可能です。
- 自動再加圧機能搭載** 加圧不足の場合、自動的に再加圧をし、加圧不足による測定ミスを防ぎます。
- 血管の伸縮性評価** 測定方式にリバロッチ・コロトコフ法を採用し、測定結果から血管の伸縮性を評価することができます。

測定データについて

【 】内の数値は、基準値を示します。

(印字例)

- 日付・時刻 17/02/15 10:15
- 最高血圧 [100~139mmHg] 124 mmHg
- 平均血圧 [74~106mmHg] 80 mmHg
- 最低血圧 [89mmHg以下] 58 mmHg
- 脈拍数 [60~80bpm (成人健常者)] 78 bpm
- 脈圧 66 mmHg
- 心負担 9672
- 心負担 [6000~12000] 124 073, 119 073, 115 073, 111 071, 107 075, 103 078, 098 078, 094 074, 090 070, 086 076, 082 072, 077 077, 072 078, 068 075, 065 075, 062 072, 058 073
- KSG [Korotkoff Sound Graph / 動脈音図] 060 070, 086 076, 082 072, 077 077, 072 078, 068 075, 065 075, 062 072, 058 073
- P-P time [60~80bpm (成人健常者)] 062 072, 058 073

測定値は自分で判断せず
医師や専門家に相談してください

波形倍率: 100%

コロトコフ音グラフ (血流の流れを視覚化)

コロトコフ音グラフのパターン分類

	スワン型(正常)	台形型	双峰型	聴診ギャップ型	直角三角形型	乏血型	不整型
パターン							
実測例							

コロトコフ音グラフは血流の流れを視覚化したものであり、そのパターン分類は診断ではありません。測定結果につきましては、自分で判断せず医師や専門家に相談してください。

FT-206仕様

一般的な名称	医用電子血圧計
測定方式	リバロッチ・コロトコフ法
圧力検出	半導体圧力センサー
血圧測定誤差	誤差平均: ±5mmHg以内 標準偏差: 8mmHg以内
カフ内圧表示誤差	±3mmHg以内
急速排気	10秒以下
目量	1mmHg
測定範囲	血圧: 20~280mmHg 脈拍: 30~180拍/分
寸法	表示部: 125(W)×307(D)×150(H)mm 測定部: 190(W)×350(D)×240(H)mm
重量	表示部: 約1.1kg 測定部: 約2.6kg
表示方式	7セグLED
排気調整	自動排気調整
圧力リミッター	285mmHg
警報	圧電ブザー
電源	表示部: 専用ACアダプター 9V(型式: BPM030S09B02) 測定部: 専用ACアダプター 12V(型式: ATM030-A120)
電源入力	表示部: 27VA以下 測定部: 25VA以下
電源に対する保護	クラスII BF形被覆部
使用環境温度/湿度/気圧	10~36°C/85%以下/700hpa~1060hpa
保存環境温度/湿度/気圧	-5~50°C/85%以下/700hpa~1060hpa
認証番号	229AGBZX00042000
JMDNコード	16173010
JANコード	4560161120512

※本装置は、JIS T 1115:2004に適合しています。また電磁両立性(EMC)規格IEC60601-1-2:2007に適合しています。本仕様は改良の良、予告なく変更する場合があります。

オプション

- 専用架台
- イス
- 測定説明パネル



販売元

株式会社 エムアイディ

福岡市博多区美野島3丁目17番27-1号
TEL(092)436-2555 FAX(092)436-2556

- 関東営業所 TEL(047)383-5525
- 東京営業所 TEL(03)5625-3566
- 名古屋営業所 TEL(052)735-7571
- 京都営業所 TEL(075)502-5231
- 阪神営業所 TEL(06)6427-1337
- 大阪営業所 TEL(06)6339-2371
- 神戸営業所 TEL(078)306-0611
- 姫路営業所 TEL(079)284-9548
- 和歌山営業所 TEL(073)441-5771
- 岡山営業所 TEL(086)805-8744
- 沖縄営業所 TEL(098)859-2549

株式会社 フィデスワン

福岡市博多区美野島3丁目17番27-1号
TEL(092)436-3022 FAX(092)436-3023

- 福岡営業所 TEL(092)436-3022
- 北九州営業所 TEL(093)964-1522
- 久留米営業所 TEL(0942)45-8870
- 佐賀営業所 TEL(0952)36-9614
- 大分営業所 TEL(097)573-9030
- 長崎営業所 TEL(095)847-7184
- 熊本営業所 TEL(096)312-5660
- 宮崎営業所 TEL(0985)63-3312
- 鹿児島営業所 TEL(099)230-0990
- 佐世保出張所 TEL(0956)42-1031



メハーゲングループ

製造販売元

株式会社 パラマ・テック
<http://www.parama-tech.com/>



〒813-0034 福岡市東区多の津1丁目7番5号
TEL(092)623-0813 FAX(092)623-0814

■お問い合わせ・ご用命は